

Etykieta / Instrukcja używania, przechowania i konserwacji

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
Aby wyrób działał skutecznie podczas czynności medycznych, należy stosować go zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zasięgnąć porady u lekarza lub fizjoterapeuty.
Instrukcję należy zachować w celu poprawnego używania wyrobu.

MIKROFIBRA – Kołdra Klasa I, Reguła 1	Kołdra	Basic UDI-DI	REF	szerokość × długość
	kołdra Super Summer	590388714MFSSMC	MF SS	135 × 200
	kołdra letnia	590388714MFLQ4	MFL	155 × 200
	kołdra wiosenna	590388714MFWQS	MFW	180 × 200
	kołdra całoroczna	590388714MFCRKS	MFCR	200 × 220
	kołdra ciepła	590388714MFPCJ	MFC	90 x 120 + 40x 60
	kołdra duo	590388714MFDUOKK	MFDUO	100 x 135 + 40 x 60
	kołdra 4 pory roku	590388714MF4PRGX	MF4PR	
kołdra - komplet dziecięcy	590388714MFKDZKR	MFKDZ		

Przeznaczenie:

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów – czynników wywołujących uczulenie. Wykazano, że na podłożu poliestrowym alergen człowieka, roztocze kurzu domowego, nie namnaża się. Z tej przyczyny kołdra z wypełnieniem poliestrowym stanowi materiał barierowy przed tym alergenem i znajduje wspomagające zastosowanie w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu wielu chorób alergicznych, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny.

Kołdra ma zastosowanie wspomagające w zapobieganiu oraz łagodzeniu przebiegu poniższych chorób alergicznych, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatok, krtań, gardła i migdałków podniebiennych).

Artykuły są niesterylnymi, nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, wielokrotnego użytku, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego używania od 10 do 12 godzin).

Opis sposobu, w jaki oceniane wyroby osiągają przewidziane działanie:

Kołdry MIKROFIBRA osiągają swoje działanie w trakcie stosowania ich podczas odpoczynku lub snu przez osoby cierpiące na alergie i osoby zdrowe. Wyrób powinien być stosowany do okrywania całej powierzchni lub części ciała.

Produkty nie są przeznaczane do bezpośredniego kontaktu ze skórą, dlatego należy stosować je zawsze powleczone w dodatkowe poszewki bawełniane.

Produkty MIKROFIBRA mogą być używane w profilaktyce odleżyn.

Użytkowanie:

Zaleca się okrywanie kołdrą całej powierzchni lub części ciała poddawanej zabiegom medycznym, podczas snu lub w ciągu dnia

UWAGA

Przeciwwskazania

Nie stosować bez konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.

Nie stosować wyrobów w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatrunkiem rany i/lub owrzodzenia.

Ostrzeżenia!

- Przed przystąpieniem do używania wyrobów, należy uważnie zapoznać się z ich instrukcjami używania. Instrukcje przekazane są w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobów. Produkty należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w ich instrukcjach. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobów oraz w każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.
- Są to wyroby wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, artykuły nie mogą być jednocześnie lub ponownie używane przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobów i stosowanych poszewek.
- Wyroby należy stosować zawsze powleczone w dodatkową poszewkę bawełnianą.
- Nie przechowywać oraz nie używać wyrobów zawilgoconych i/lub przemoczonych. Nie stosować wyrobów w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.
- Nie stosować wyrobów uszkodzonych lub zabrudzonych/zanieczyszczonych.
- W przypadku uszkodzenia lub niemożliwych do usunięcia zabrudzeń należy wymienić wyrób na nowy lub wyroby na nowe.
- Pod wpływem okresu używania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmechanczenie lub zmiana barwy poszycia wyrobów (żółknięcie), a także istnieje możliwość zbrzydlenia się ich wypełnienia, co nie wpływa na obniżenie ich właściwości. Zaleca się strzepnięcie wyrobu po jego każdorazowym użyciu bądź praniu, celem zapewnienia równomiernego rozłożenia wypełnienia wewnątrz w przypadku jego skupienia się w jednym miejscu.
- Gwarantowany okres użytkowania wyrobów wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości przy założeniu stosowania wyrobów zgodnie z zaleceniami podanymi w ich oznakowaniu.
- W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych, związanych z użytkowaniem wyrobów, należy natychmiast zaprzestać ich używania i skonsultować się z lekarzem.

Przechowanie i konserwacja:

Artykuły należy transportować w oryginalnych opakowaniach. W trakcie ich transportu i przechowywania należy zabezpieczyć je przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wyroby przechowywać i używać w suchych, przewiewnych, pozbawionych wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniach. Nie narażać wyrobów na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyroby należy zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piecyki). Regularnie wietrzyć. Strzepnąć po każdorazowym użyciu, celem równomiernego rozłożenia wypełnienia wewnątrz wyrobu. Wyroby powinny być poddawane min. 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobów zabrudzonych lub zawilgoconych. Nie prac z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strzepnąć kołdrę.

Wyroby należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków roztworobójczych, w celu eliminacji alergenów.

Stosować następujące procedury konserwacji:



Prać w temperaturze do 95 °C przy użyciu środków do prania.

Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.

Suszyć w stanie rozwieszonym. Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w temperaturze max. 60 °C.

Dopuszczalne wirowanie na niskich obrotach (max 400 obr/min).

Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Nie usuwać plam rozpuszczalnikami.



Trzymać z dala od światła słonecznego



Chronić przed wilgocią

SKŁAD SUROWCOWY:

POSZEWKA TKANINA: 100% poliester (mikrofibra)
POSZEWKA WYPEŁNIENIE: 100% poliester (włókno)
POSZEWKA MEMBRANA: 100% polipropylen (spunbond)
POSZEWKA PIKOWANIE: 100% poliester (nici)
WYPEŁNIENIE KOŁDRY: 100% poliester (włókno)
WSZYSTKA TECHNICZNA I NAROŻNA: 100% poliester
LAMOWANIE: 100% poliester (mikrofibra + nici)

Wytwórca:

AMZ
Przemysław Zabel

ul. Wiosny Ludów 31
64-500 Szamotuły

<https://amz.com.pl/>